



Made in Italy

1 ML IN 2 MIN*

MAGICCARE

IL VERO BENESSERE

HEALTHCARE AT HOME



* Valore approssimativo riscontrato con soluzione fisiologica NaCl 0,9% / Approximate value obtained with saline to NaCl 0,9%



DISPOSITIVO MEDICO PER AEROSOLTERAPIA MEDICAL DEVICE FOR AEROSOL THERAPY

- **Con pratico vano porta accessori**
With practical accessory compartment
- **Massima efficacia terapeutica in tutto il tratto respiratorio / For the best therapeutic efficacy on the entire respiratory tract**
- **Ampolla efficiente e rapida, a 2 velocità con micronizzazione testata (EN 13544-1)**
High performance 2 speed nebulizer, particle size tested by TÜV (EN 13544-1)
- **Con mascherina pediatrica e adulto**
With adult and child mask

BORA PLUS

Garanzia 3 anni

**• CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES**

Mod.: P0106EM F700

Compressore rotativo a pistone (esente da lubrificazione e da manutenzione)
Reciprocating piston compressor (designed for use without lubrication or maintenance)

| | |
|--|--|
| Alimentazione/Potenza: Power supply/Power: | 230 V ~ 50 Hz/140 VA Other voltages available on request |
| Filtraggio aria: Air filtering: | Per una maggiore qualità, l'aria compressa viene aspirata dall'ambiente esterno e filtrata con un sistema ad alta efficienza (porosità 50/70 µm) For better quality, the compressed air is extracted external of the housing and filtered using a high efficiency filter system (porosity 50/70 µm) |
| Portata aria al compressore: Compressor air output: | 10 l/min (approx.) |
| Pressione Max: Max pressure: | 2,6 ± 0,4 bar 2.6 ± 0.4 bar |
| Rumorosità (a 1 m): Sound level (at 1 m): | 57 dB (A) (approx.) |
| Dimensioni: Dimensions: | 18 (L) x 30 (P) x 12 (H) cm 18 (length) x 30 (width) x 12 (height) cm. |
| Peso apparecchio: Handset Weight : | 1,5 Kg 1.5 Kg |
| Conforme alla direttiva 93/42 CEE e successivi aggiornamenti (solo per unità 230 V ~ 50 Hz): In compliance with Dir. 93/42/EEC and subsequent updates (for the 230 V ~ 50 Hz unit only): | |
| Omologazioni: Approvals: | |
| Garanzia: Warranty: | 3 ANNI Please refer to your local dealer |




- 1** Ampolla RF8 Dual Speed con micronizzazione testata TÜV
RF8 Dual Speed nebulizer, particle size tested by TÜV
- 2** Boccaglio / Mouthpiece
- 3** Nasale pediatrica / Child nasal prong
- 4** Mascherina pediatrica Soft Touch
Soft Touch Child mask
- 5** Mascherina adulto Soft Touch
Soft Touch Adult mask
- 6** Aria depurata con filtraggio di tipo professionale
Air purified by a professional filter
- 7** Ampio vano porta accessori
A wide accessory compartment
- 8** Pratico vano raccogli cavo sul fondo dell'apparecchio
Practical cable compartment on the bottom of the unit


**• CARATTERISTICHE TECNICHE DI NEBULIZZAZIONE
NEBULISATION TECHNICAL FEATURES**

| Nebulizzatore / Nebuliser RF8 Dual Speed | Max | Min | |
|---|---------------------|---------------------|--|
| Erogazione / Delivery ml/min (approx.) | 0,50 0.50 | 0,28 0.28 | |
| MMAD µm | 3,86 3.86 | 3,69 3.69 | Caratterizzazione in vitro certificata da TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in conformità allo Standard Europeo per apparecchi da aerosolterapia Norma EN 13544-1. Maggiori dettagli sono disponibili su richiesta. In vitro testing certified by TÜV Rheinland LGA Products GmbH - Germany in compliance with the European Standard EN 13544-1 for nebulizing systems. Further details available on request. |
| Frazione respirabile < 5 µm % Breathable fraction < 5 µm (FPF) % | 62,5 62.5 | 64,2 64.2 | |
| Capacità massima Maximum fill volume | 8 ml | | |



**FASE INSPIRATORIA
INSPIRATORY PHASE**

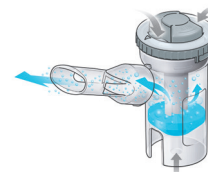

**FASE ESPIRATORIA
EXPIRATORY PHASE**

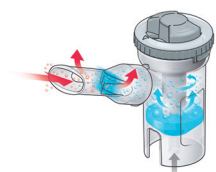

FUNZIONAMENTO CON TASTO SELETTORE IN POSIZIONE "MIN"
Questa condizione limita l'afflusso dell'aria all'interno dell'ampolla ottimizzando l'emissione del farmaco verso il paziente e limitandone la dispersione. / SPEED SELECTOR IN "MIN" POSITION > A slower flow ensure optimal particle size value up to the lower respiratory tract, limiting the dispersion of medication into the environment.

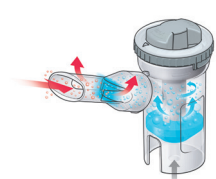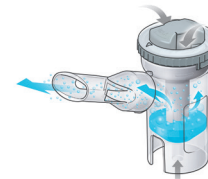

FUNZIONAMENTO CON TASTO SELETTORE IN POSIZIONE "MAX"
Questa condizione aumenta l'afflusso dell'aria all'interno dell'ampolla incrementando la velocità di erogazione dell'aerosol e ottimizzando anche in questo caso l'emissione del farmaco verso il paziente, limitandone la dispersione. / SPEED SELECTOR IN "MAX" POSITION > The air flow into the nebulizer is enhanced and medication is delivered faster, reducing the treatment time, ensure optimal particle size value and limit the dispersion of medication into the environment.

17496 © Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2017 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate. FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso. FLAEM NUOVA reserves the right to make technical and functional alterations to this product without prior notice.

BORA PLUS

Codice Code SC69P00
Imballo Master carton n° 6 Pz
6 pieces



BORA PLUS

MAGICCARE

è un marchio registrato di proprietà di
is a registered trademark owned by

FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221-223-225
25015 S. MARTINO DELLA BATTAGLIA
(Brescia) - ITALY
Phone (39)0309910168 - Fax (39)0309910287
E-mail: info@flaemnuova.it



FLAEM NUOVA S.p.A. è un'azienda con sistema di qualità certificato. Company with certified quality system.

www.flaemnuova.it